




part of the game

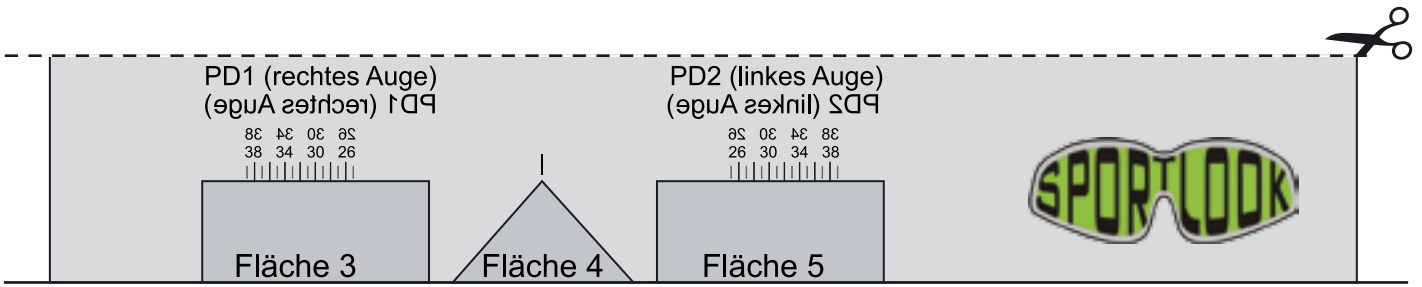

Faltelinie 2

Fläche 2

Faltelinie 1

Fläche 1



1. Drucken Sie die Vorlage aus.
2. Schneiden Sie den mit den zwei gestrichelten Linien gekennzeichneten Bereich aus.
3. Klappen Sie die Fläche 1 an der Faltelinie 1 nach hinten um.
4. Klappen Sie anschließend die Fläche 2 an der Faltelinie 2 nach hinten um.
5. Schneiden Sie die Flächen 3,4,5 aus.
6. Setzen Sie die Schablone auf der Nase auf und schauen Sie in einen Spiegel.
7. Lesen Sie den Wert für die Pupillendistanz PD1 (rechtes Auge/Mitte der Pupille) ab.
8. Lesen Sie den Wert für die Pupillendistanz PD2 (linkes Auge/Mitte der Pupille) ab.

